

emmi[®] PET



PROFESIONÁLNE ČISTENIE ZUBOV PRE ZVIERATÁ SO 100% ULTRAZVUKOM

Návod na obsluhu emmi[®]-pet

Sme radi, že sa zaujímate o našu ultrazvukovú zubnú kefku emmi -pet na čistenie zubov a ústnu hygienu vášho domáceho maznáčika. Pozorne si prečítajte návod na obsluhu, aby ste boli oboznámení s používaním ultrazvukovej zubnej kefy emmi -pet na čistenie zubov a ústnu hygienu a dosiahli čo najlepšie výsledky pre vášho domáceho miláčika.

Obsah balenia emmi -pet:

- 1x rukoväť emmi -pet,
- 1x nabíjacia stanica emmi -pet
100-240 V,
- 1x ultrazvukové nástavce emmi -
pet A1/A2,
- 1x ultrazvuková zubná pasta
emmi -pet pre zvieratá (75 ml).



VDH

Dôležité - Nabíjanie batérií / Životnosť na jedno nabitie

Kefka musí byť počas nabíjania vypnutá, inak sa nenabíja. Ak zariadenie používate raz denne približne 10 minút, jedno nabitie batérie vydrží približne 10 dní. Potom dobíjanie podľa potreby.

Prvé použitie

1. Ultrazvukový nástavec vždy pripevňujte vertikálne a tiež ho odoberajte vertikálne smerom nahor. Zabráňte tak poškodeniu kontaktných kolíkov nástavca v dôsledku naklonenia.
2. Pripojte zástrčku nabíjacej stanice do zásuvky, položte nástavec s pripojenou kefkou na nabíjaciu stanicu a nabíjajte 24 hodín.

LED dióda 1 sa rozsvieti na modro hned', ako sa kefka položí na nabíjaciu stanicu. Jasné Modré svetlo znamená: prebieha nabíjanie, tlmené modré svetlo znamená: nabíjanie je ukončené.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ultrazvukové prístroje od spoločnosti Emmi Ultrasonic GmbH predstavujú inovatívnu a účinnú metódu čistenia zubov a ústnej hygieny (mikročistenie zubov) pre zvieratá. Pozorne a úplne si prečítajte návod na obsluhu, ako aj priložené upozornenia. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom dodržiavajte nasledujúce pokyny:

1. Nabíjaciu stanicu umiestnite tak, aby nemohla spadnúť do vane alebo umývadla.
2. Nabíjaciu stanicu používajte len na suchom povrchu a v suchom prostredí.
3. Ak nabíjacia stanica spadla do vody, nedotýkajte sa jej. Okamžite odpojte sieťovú zástrčku.

LED displej



LED 1: Červené, zelené a modré svetlo na tlačidle v jednej LED.

1. LED modrá - nabíjanie

LED dióda 1 sa rozsvieti na modro hned', ako sa kefka položí na nabíjaciu stanicu. Jasné modré svetlo znamená, že prebieha nabíjanie, tlmené modré svetlo znamená, že nabíjanie je ukončené.

2. Zelená LED dióda - zapnutá

Po zapnutí spotrebiča a nasadení hlavice kefy sa kontrolka LED trvalo rozsvieti na zeleno.

3. LED bliká červeno - treba nabiť

V prípade poruchy sa rozsvieti červená kontrolka a spotrebič sa vypne. Ak je batéria silne vybitá, LED dióda 1 po čistení niekoľkokrát blikne červeno. Kefka by sa teraz mala dobíť, pretože energia batérie nemusí byť dostatočná na ďalší proces čistenia.

4. Žiadne svetlo - Zariadenie je vypnuté.

Ďalšie vlastnosti

- ☑ Detekcia prídavného zariadenia (funkcia Transport Safe): bez prídavného zariadenia sa spotrebič automaticky vypne a nie je možné ho zapnúť. Zelená LED dióda sa nakrátko rozsvieti a opäť zhasne.
- ☑ Automatické vypnutie (funkcia bezpečnej batérie): spotrebič sa automaticky vypne po 6 minútach.



Pri nabíjaní vždy nasad'te kefový nástavec, aby ste mali lepšiu kontrolu nad stavom zariadenia.



Správne použitie

Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu, dodržiavajte nasledujúce pokyny: Výrobky môžu používať len na účely uvedené v brožúrach a technických popisoch, t. j. na čistenie zubov a ústnu hygienu zvierat, a len v spojení so zariadeniami alebo komponentmi tretích strán, ktoré odporúča alebo povoľuje spoločnosť Emmi Ultrasonic GmbH. Akékoľvek iné alebo ďalšie použitie sa považuje za nesprávne použitie. V prípade nesprávneho použitia spoločnosť Emmi Ultrasonic GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a neposkytuje žiadnu záruku, že komponenty budú fungovať správne a. K používaniu v súlade s určením patrí aj dodržiavanie všetkých pokynov uvedených v návode na obsluhu. ⚠ Je to symbolom na typovom štítku. Správna a bezpečná prevádzka výrobkov si vyžaduje správnu prepravu, skladovanie, inštaláciu a montáž, ako aj starostlivú obsluhu a údržbu. Musia sa dodržiavať pravidelné kontroly v súlade s DGUVV3. Zariadenie musí byť nastavené tak, aby sieťová zástrčka nabíjacej stanice bola vždy voľne prístupná.

Nesprávne použitie

Nesprávne používanie výrobku môže viesť k ohrozeniu života a zdravia, ako aj k poškodeniu majetku. Z tohto dôvodu je nesprávne používanie zakázané.

V prípade nesprávneho použitia spoločnosť Emmi Ultrasonic GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a neposkytuje žiadnu záruku, že komponenty budú fungovať správne:

- ❑ Ultrazvukový prístroj na čistenie zubov a ústnu hygienu sa smie prevádzkovať len so sieťovým napätím uvedeným typovom štítku (spodná strana nabíjacej stanice).
- ❑ Na čistenie nepoužívajte horľavé alebo agresívne chemikálie, kyseliny, zásady a podobne.
- ❑ Ak sa zistí poškodenie pri preprave, nabíjaciu stanicu nepripájajte k elektrickej sieti.
- ❑ Spotrebič sa môže používať len v interiéri prevádzkovať pri izbovej teplote.



Ako pripraviť vášho domáceho miláčika na ultrazvukové čistenie zubov pomocou prístroja emmi -pet.

- 1 Vytlačte na prst 1 cm veľký kúsok ultrazvukovej zubnej pasty. Nechajte svojho domáceho miláčika zubnú pastu očucháť a olízať.
- 2 Zapnite zariadenie a ukážte ho svojmu zvieratú.
- 3 Priložte ručnú súpravu s pripojeným ultrazvukovým nástavcom k ústam vášho domáceho maznáčika a upokojujúco naňho hovorte.
- 4 Opatrne nadvihnite pery a pomaly nasad'te kefový nástavec, aby sa váš domáci miláčik oboznámil s procesom čistenia.
- 5 Teraz si začnite čistiť zuby. Prechádzajte od zubu k zubu a opakujte nasledujúce kroky aplikácie. Ultrazvukovú zubnú pastu rozotrite štetinkami po vnútornej a vonkajšej strane zubov a na žuvacie plochy. Začnite zadnými stoličkami a štetiny ultrazvukového nástavca držte bez pohybu a bez tlaku na zuby. Ultrazvukovým nástavcom 1 až 3 zuby naraz. Na zuboch zotrvať približne 10 sekúnd a potom pokračujte na ďalšie zuby. Počas čistenia prístrojom nehýbte, inak nebude účinný. [®]Mikroublínky vytvárané ultrazvukom emmi -pet v ultrazvukovej zubnej paste zabezpečujú dôkladné čistenie zubov bez abrázie.
- 6 Po vyčistení zubov opláchnite štetiny pod tečúcou vodou. Spotrebič zostane zapnutý. Po opláchnutí môžete spotrebič vypnúť. Ultrazvuk má sterilizačný účinok, takže štetiny sú po opláchnutí dezinfikované. Spotrebič môžete po každom čistení umiestniť späť do nabíjacej stanice. Tým sa nepoškodí batérie.



Pravidelné používanie

®Odporúčame používať emmi -pet pravidelne na čistenie zubov a hygienu ústnej dutiny, približne 1 až 3-krát týždenne (veterinári odporúčajú čistiť zuby denne). V závislosti od stupňa znečistenia zubov vášho domáceho maznáčika by malo čistenie zubov trvať 3 až 10 minút. Ak sa zuby čistia pravidelne (denne), ako preventívne opatrenie postačujú 3 minúty. ®Ak sa zuby vášho domáceho zvierat'a čistia pomocou prístroja emmi -pet nepravidelne, odporúčame až 10 minút intenzívnej sonikácie zubov. Ultrazvuk je pre vaše zviera absolútne neškodný. V prípade kritického zápalu alebo silného nánosu zubného kameňa sa odporúča dlhší čas čistenia a kontrola u veterinára.

Ako odstrániť existujúci zubný kameň?

Postup čistenia je rovnaký ako pri preventívnom používaní, avšak trvanie procedúry závisí od množstva zubného kameňa. Pri väčšom nánose je odporúčané priložiť kefku na postihnutý zub a nechať ju pôsobiť na konkrétnych miestach dlhšiu dobu (až do 15 minút). Pre dosiahnutie lepších výsledkov je vhodné postup po niekoľkých dňoch zopakovať až kým nedôjde k uvoľneniu zubného kameňa.

Ako funguje emmi -pet v kombinácii so špeciálnou ultrazvukovou zubnou pastou emmi -pet obohatenou o mikrobublínky?

Dodávaná ultrazvuková zubná pasta emmi -pet obsahuje mikroskopicky malé vzduchové bublinky (mikrobublínky), ktoré boli obohatené v ďalšom výrobnom kroku, čo potvrdila Goetheho univerzita vo Frankfurt nad Mohanom. Na ploche jedného mm³ bolo zistených viac ako 3,5 milióna mikrobubliniek. Ultrazvukové vibrácie ničia štruktúru mikrobublín a tie sa rozpadajú. Tým vzniká sací efekt, ktorý uvoľňuje biofilm a zubný povlak zo zubov. Po dočistení odporúčame prejsť po zuboch štetinkami, aby sa uvoľnený biofilm a zubný povlak zo zuba odstránil. To všetko sa deje bez toho, aby vaše zviera čokoľvek pocítilo.

DÔLEŽITÉ:

Zariadenie funguje bez vibrácií alebo hluku, aby zviera nevystrašilo alebo neznepokojilo. Ak sa chcete uistiť, že zariadenie pracuje správne, skontrolujte, či počas prevádzky trvalo svieti zelený indikátor pod spínačom na rukoväti. Zariadenie nie je možné zapnúť bez pripojeného ultrazvukového nástavca.

Akútny zápal ďasien

V prípade akútnych problémov držte štetiny voľne pri postihnutých zuboch a potom aj priamo pri ďasnách. Ak je to možné, podržte ich tam 30 až 60 sekúnd. To vám umožní dosiahnuť rýchle a účinné zlepšenie. Dlhší čas aplikácie nie je problematický, pretože použitý ultrazvuk je absolútne neškodný.

Odstránenie zápachu z úst

Keďže ultrazvuk emmi -pet redukuje baktérie na ďasnách, možno sa vyhnúť nepríjemnému zápachu živými baktériami. Tento efekt trvá niekoľko hodín.

Spôsob pôsobenia

Ultrazvukové čistenie zubov a ústna hygiena je účinná metóda na domáce použitie. ©Emmi -pet nefunguje ako tradičné manuálne, elektrické alebo sonické zubné kefky, ktoré fungujú na základe mechanického obrusovania. ©Emmi -pet využíva možnosť modernej ultrazvukovej technológie. ©Pri čistení zubov pomocou emmi -pet sa čistenie nevykonáva "brúsením" abrazívnymi látkami, ako je to obvyklé pri bežných zubných pastách, ale jemným ultrazvukom. Použitie mäkkého ultrazvuku je absolútne neškodné pre ľudí a zvieratá bez ohľadu na vek. Bolo vedecky dokázané, že ultrazvuk s výkonom do 50 W ľudí a zvieratá neškodný. ©Ultrazvuk emmi -pet pracuje s výkonom iba 0,2 wattu.

Pozitívny účinok a bezpečnosť boli preukázané a potvrdené veterinárskymi zubármi. Čistenie zubov a ústna hygiena ultrazvukom sa používa už roky bez vedľajších účinkov. Milióny ultrazvukových vln sa vysielajú každú minútu prostredníctvom patentovaného ultrazvukového čipu v hlave kefy.

Ultrazvukové vlny sa prenášajú do ultrazvukovej zubnej pasty cez každú jednotlivú štetinu. ©Dodávaná ultrazvuková zubná pasta emmi -pet obsahuje mikroskopicky malé vzduchové bublinky (mikrobublinky), ktoré boli obohatené v ďalšom výrobnom kroku. to Goetheho univerzity vo Frankfurt nad Mohanom. Na ploche jedného mm² bolo zistených viac ako 3,5 milióna mikrobublín. Ultrazvukové vibrácie ničia štruktúru mikrobublín. Tým vzniká sací efekt, ktorý uvoľňuje biofilm a zubný povlak zo zubov. Následne odporúčame prejsť po zuboch štetinkami, aby sa uvoľnený biofilm a zubný povlak zo zuba odstránil. To všetko sa deje bez toho, aby si vaše zvieratá čokoľvek všimlo.



©Emmi -pet čistí aj tam, kam štetiny nedosiahnu.
Ultrazvuk redukuje baktérie na ďasnách a hlboko v nich.

emmi -pet Ultrazvuková zubná pasta pre zvieratá

emmi -pet je ultrazvuková zubná pasta špeciálne vyvinutá pre zvieratá

emmi -pet A1/A2 Ultrazvukové nadstavce

Veľký nástavec pre veľké psy a kone. Malý nástavec pre malé psy a mačky.

Z hygienických dôvodov by sa ten istý nástavec nemal používať pre viacero zvierat. Nástavce sa musia vymieňať každé 3 mesiace, pretože po uplynutí tejto doby štetiny vplyvom ultrazvuku zmäknú. Čím sú štetiny mäkkšie, tým je prenos ultrazvuku nižší a výsledky čistenia horšie. Náhradné nástavce sú k dispozícii v internetovom obchode.



Starostlivosť o batérie a ich likvidácia

Batérie sú umiestnené vo vodotesnej rukoväti zariadenia. Rukoväť je možné po použití vrátiť do nabíjacej stanice alebo ju úplnom nabití až približne 10 dní bez nabíjania. Ak je celkový čas čistenia za deň dlhší ako 10 minút, batérie vydržia kratšie. Bezpodmienečne dbajte na to, aby batérie neboli nikdy úplne vybité: ak batérie dosiahli kritickú úroveň vybitia, displej sa po zapnutí nerozsvieti na zeleno, ale na červeno a začne blikať. V takom prípade je potrebné zariadenie znovu nabiť, aby sa zabránilo možnému poškodeniu batérií. Zariadenie obsahuje špeciálnu ekologickú lítiovú batériu, ktorá sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu. Na likvidáciu môžete použiť zberné nádoby GRS (Spoločný systém spätného odberu) a iné zberné miesta (napr. všetky predajné miesta podobných nabíjateľných batérií).